



HORIEN BestBalance – płyn wielofunkcyjny 500 ml (05-2026)

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

HORIEN-BEST-500

Opis produktu

HORIEN BestBalance

data ważności: 05-2026

Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, w tym silikonowo-hydrożelowych: czyści, płucze, dezynfekuje, nawilża, usuwa osady białkowe i służy do przechowywania. Zalecane przechowywanie w temperaturze 5–30°C; zużyć przed końcem ważności i nie stosować dłużej niż 3 miesiące od otwarcia. Opakowanie 500 ml zawiera pojemnik na soczewki i skróconą instrukcję na etykiecie.

Najważniejsze cechy

- Substancje czynne: polyhexanide i EDTA – dezynfekcja i wsparcie usuwania osadów.
- Składniki nawilżająco-czyszczące: HPMC (hypromeloza), D-sorbitol, poloksamer – poprawa zwilżalności i usuwanie zanieczyszczeń.
- Funkcje 5-w-1 – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja, nawilżanie, przechowywanie.
- Czas dezynfekcji minimum 4 godziny; okres przydatności po otwarciu do 3 miesięcy.

Zastosowanie

Po umyciu i osuszeniu rąk umieścić soczewkę na dłoni, nanieść co najmniej 3 krople roztworu i delikatnie pocierać przez około 10 sekund z obu stron, następnie spłukać. Umieścić soczewkę w pojemniku wypełnionym świeżym płynem i pozostawić na minimum 4 godziny; powtórzyć dla drugiej soczewki. Roztwór może być używany do płukania przed aplikacją oraz do przechowywania soczewek między użyciami.

