

Link do produktu: <https://servoptic.pl/jednodniowe-soczewki-kontaktowe-bausch-lomb-ultra-one-day-p-3027.html>

ULTRA® ONE DAY - opakowanie 30 szt.



Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Ultra One Day

Opis produktu

Jednodniowe soczewki kontaktowe ULTRA® ONE DAY

Cechy produktu

- Zaawansowane technologie Advanced MoistureSeal® i ComfortFeel zapewniają komfort noszenia do 16 godzin
- Soczewki utrzymują 96% nawilżenia przez cały dzień użytkowania
- Materiał kalifilcon A gwarantuje wysoko uwodnione środowisko, wspierające komfort i zdrowie oczu
- Stopniowe uwalnianie składników nawilżających dla całodziennego komfortu
- Wysoka tlenoprzepuszczalność (134 Dk/t w centrum soczewki o mocy -3,00 D) wspiera zdrowy wygląd oczu
- Filtr UV klasy II: blokuje co najmniej 95% promieniowania UVB i 50% UVA
- Wyjątkowa miękkość, gładkość i delikatność powierzchni soczewki
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki odpowiedniej konstrukcji i właściwościom materiału
- Optyka wysokiej rozdzielczości zapewniająca wyraźne widzenie przez cały dzień, również podczas jazdy nocą

Parametry techniczne

- Krzywizna: 8,6 mm
- Średnica: 14,2 mm
- Uwodnienie: 55%
- Tlenotransmisyjność: 134 Dk/t (dla mocy -3,00 D)
- Filtr UV: Tak (Klasa II)
- Konstrukcja: optyka wysokiej rozdzielczości
- Tryb noszenia: dzienny
- Tryb wymiany: jednodniowy
- Materiał: kalifilcon A
- Rodzaj soczewki: sferyczna
- Ilość soczewek w opakowaniu: 30 lub 90 sztuk



-
- Zakres mocy: od +6,00 D do -12,00 D

Zastosowanie

- Korekcja wad wzroku w trybie jednodniowym
- Odpowiednie dla osób oczekujących wysokiego komfortu i nawilżenia przez cały dzień
- Przeznaczone do codziennego użytkowania bez konieczności pielęgnacji soczewek po zdjęciu

Instrukcje użytkowania

- Przed założeniem i zdjęciem soczewek należy dokładnie umyć i wysuszyć dłonie, unikając mydeł perfumowanych i leczniczych
- Soczewkę umieszcza się na palcu wskazującym, sprawdzając jej stan oraz prawidłowe ułożenie
- Nie używać uszkodzonych lub porysowanych soczewek
- Po zdjęciu soczewki należy ją wyrzucić
- Unikać kontaktu soczewek z kosmetykami, emulsjami i innymi substancjami chemicznymi
- Nie używać paznokci ani ostrych przedmiotów do manipulowania soczewkami

Dodatkowe informacje

- Soczewki kontaktowe pochłaniające promieniowanie UV nie zastępują okularów ochronnych przeciwsłonecznych
- Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania po konsultacji ze specjalistą
- Szczegółowa instrukcja użytkowania dostępna na stronie producenta

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SFERA: -12,0 D , -11,5 D , -11,0 D , -10,5 D , -10,0 D , -9,50 D , -9,00 D , -8,50 D , -8,00 D , -7,50 D , -7,00 D , -6,50 D , -6,00 D , -5,75 D , -5,50 D , -5,25 D , -5,00 D , -4,75 D , -4,50 D , -4,25 D , -4,00 D , -3,75 D , -3,50 D , -3,25 D , -3,00 D , -2,75 D , -2,50 D , -2,25 D , -2,00 D , -1,75 D , -1,50 D , -1,25 D , -1,00 D , -0,75 D , -0,50 D , -0,25 D , +0,25 D , +0,50 D , +0,75 D , +1,00 D , +1,25 D , +1,50 D , +1,75 D , +2,00 D , +2,25 D , +2,50 D , +2,75 D , +3,00 D , +3,25 D , +3,50 D , +3,75 D , +4,00 D , +4,25 D , +4,50 D , +4,75 D , +5,00 D , +5,25 D , +5,50 D , +5,75 D , +6,00 D

